


VISIERA PROTETTIVA VIRLAP

CE Cat. 1 EN166:2001



AUTOCERTIFICAZIONE PER MARCHIATURA CE CAT 1 EN166

VISIERA PROTETTIVA VIRLAP

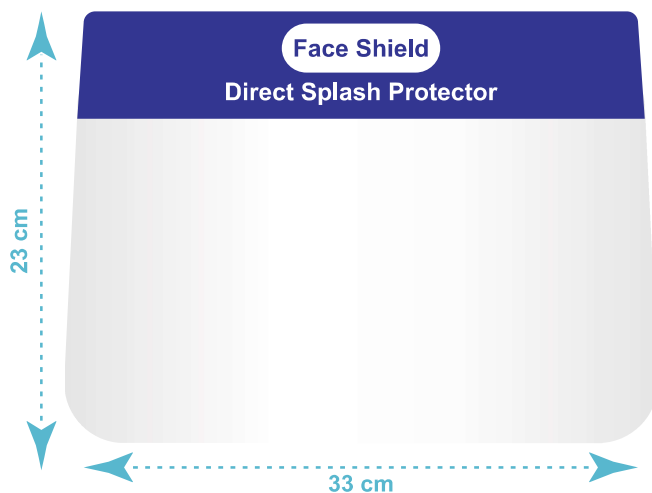

ELENCO MATERIALI

- PVC trasparente LL di spessore 0,4 mm •
- Packazote™ Gomma piuma spessore cm 2,5 •
- Elastico di altezza 2 cm •

MISURE

- base cm 33
- altezza cm 23

SCOPO FINALE

Realizzato al fine di una prima protezione da schizzi di vari liquidi



AVVERTENZE

Modello/Tipo DPI: Visiera Protettiva VIRLAP **Anno di costruzione: 04/2020** **Materiale della visiera: PVC TRASPARENTE LL**

Il presente DPI è di Categoria I (rischi minimi) ed è conforme alla norma EN 166: 2001

AVVERTENZE

Istruzioni d'uso e manutenzione

L'utilizzatore prima di procedere all'impiego del DPI deve verificare che sia adeguato all'uso previsto (prendendo completa lettura delle presenti istruzioni). Se il DPI viene utilizzato con altri DPI, l'utilizzatore deve valutare se la combinazione è idonea all'utilizzo. Indossare il DPI prima di esporsi alle eventuali condizioni di rischio per le quali è richiesta la protezione. I DPI sono intesi per la protezione personale e non devono essere scambiati tra più utilizzatori.

Nell'eventualità che durante l'uso il DPI venga danneggiato deve essere immediatamente sostituito; in caso di contaminazione il DPI deve essere immediatamente smaltito e sostituito.

Non esporre il DPI a fonti di calore o radiazioni UV.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Verificare l'integrità di ogni componente e pulire il DPI con sapone. Igienizzare con una soluzione alcolica per almeno 15 minuti, e lasciare asciugare. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e non utilizzare detergenti o disinfettanti abrasivi. Conservare nella confezione soltanto DPI non contaminati, a temperatura tra i 5°C e 40°C in ambiente asciutto e privo di vapori organici o polveri abrasive. Conservare a temperatura tra i 5°C e 40°C in ambiente asciutto e privo di vapori organici o polveri abrasive.

